

L'INCONTINENZA:
**SOLUZIONI E
CONSIGLI**



fater



Gentile Utente,

La **Regione Sardegna**, per rispondere alle esigenze dei propri assistiti, ha attivato un servizio di consegna a domicilio di ausili ad assorbenza.

Le informazioni di seguito riportate Le saranno utili per sapere **di più sull'incontinenza e sui prodotti a disposizione.**

Come imparare a prendersi cura di se stessi o degli altri

Di seguito potrà trovare preziosi consigli per prendersi cura di sé o di una persona a lei cara, una guida pratica per la corretta gestione dell'incontinenza urinaria.

Parlare dell'incontinenza è il primo passo per stare bene

Uno dei primi disagi che ci si ritrova ad affrontare quando arriva l'incontinenza, sia essa leggera, media o grave, è parlarne con la propria famiglia, con il proprio partner o con il proprio medico.

Condividere le proprie debolezze, di qualunque tipo esse siano, con la persona con cui abbiamo una relazione affettiva può essere fonte di imbarazzo ma chiudersi in se stessi può portare facilmente a non affrontare il problema e ad ingigantirlo.

Molte persone che soffrono di incontinenza possono sentirsi

insicure nel vivere alcune attività; **parlarne con chi ci vuole bene o anche col proprio medico può essere un grande sollievo.**

Accanto al rischio di dermatite, per chi indossa ausili ad assorbenza, vi è anche quello relativo al disagio correlato all'umidità, all'aumento della temperatura della zona intima e all'attrito fino ad arrivare alle piaghe da decubito.

Afronte di ciò, per evitare irritazioni e infezioni, è di fondamentale importanza seguire una corretta igiene personale.

Cos'è l'incontinenza urinaria?

“L'emissione involontaria di urina in luoghi e tempi inappropriati, oggettivamente dimostrabile e di grado tale da costituire un problema igienico e sociale”.

Si stima che in Italia a soffrire di questo disagio siano all'incirca 5 milioni di persone, tra l'8% e il 9% della popolazione.

Le tipologie di incontinenza



DA URGENZA

Contrazione involontaria della vescica che ne determina uno svuotamento parziale o completo.



DOPPIA

Si verifica quando un soggetto è affetto da perdite sia urinarie che fecali.



FUNZIONALE

Riguarda solitamente i soggetti che non riescono a recarsi in bagno per via di malattie croniche o disturbi motori.



DA SFORZO

Lievi perdite che si verificano quando si ride, si tossisce, ci si sforza o quando si svolge un'attività fisica.



MISTA

Combinazione tra quella da sforzo e quella da urgenza.



RIFLESSA

Costante gocciolamento o perdita totale di urina senza consapevolezza.



DA RIGURGITO

Si verifica quando la vescica si riempie oltre la sua capacità e non riesce mai a svuotarsi completamente.

Numeri utili

PER LA CONSULENZA INFERMIERISTICA
E PER INFORMAZIONI SULLE CONSEGNE,
DALL'ITALIA:

Numero verde
800 902 649


Dal lunedì al venerdì | Ore **9:00 - 17:00**

Scegliendo il **TASTO 1** sarà possibile parlare con un operatore sanitario per:

- Attivare, rinnovare o sospendere la fornitura;
- Individuare il prodotto più adeguato;
- Richiedere variazioni di taglia;
- Richiedere variazioni di tipologia di prodotto;
- Ricevere molte altre informazioni sul piano terapeutico.

Scegliendo il **TASTO 2** sarà possibile:

- Ricevere informazioni sulla data indicativa di consegna dei prodotti;
- Concordare una nuova data di consegna;
- Comunicare variazioni anagrafiche.

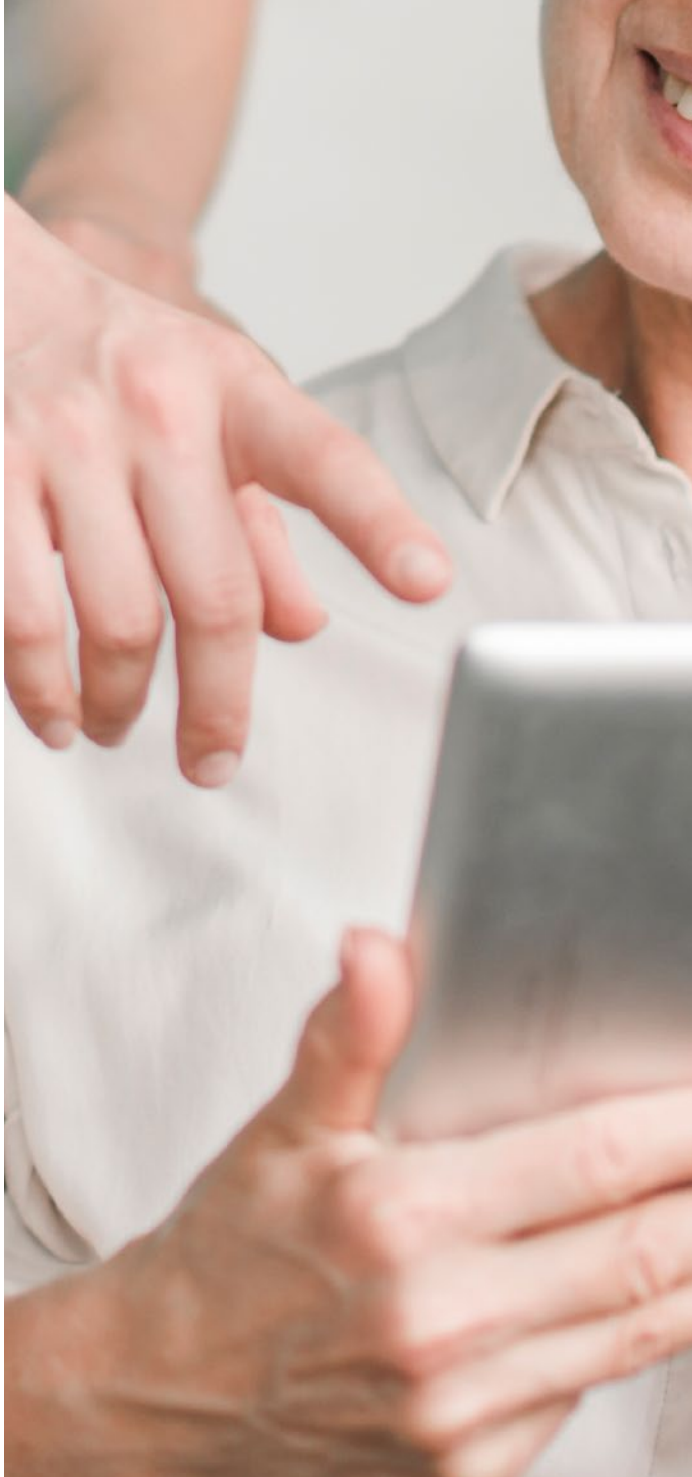

In questa sezione vengono forniti **preziosi consigli per la scelta degli ausili assorbenti più adatti** alle esigenze di chi li indossa.


La gamma dei prodotti offerti dal servizio sanitario della tua regione comprende numerosi articoli scelti per rispondere ad ogni tipologia e livello di incontinenza.

I prodotti sono diversi per tipologia e misura: ciascuno dei modelli disponibili può risultare più utile e più comodo, a seconda delle proprie necessità.

**Scopriamo insieme
come scegliere
il prodotto giusto.**

Livello di assorbenza del presidio

Il giusto prodotto dipende dal livello d'incontinenza. Esso le verrà individuato da un professionista sanitario che la aiuterà ad individuare sia il suo livello di incontinenza che il prodotto più idoneo alle sue esigenze.

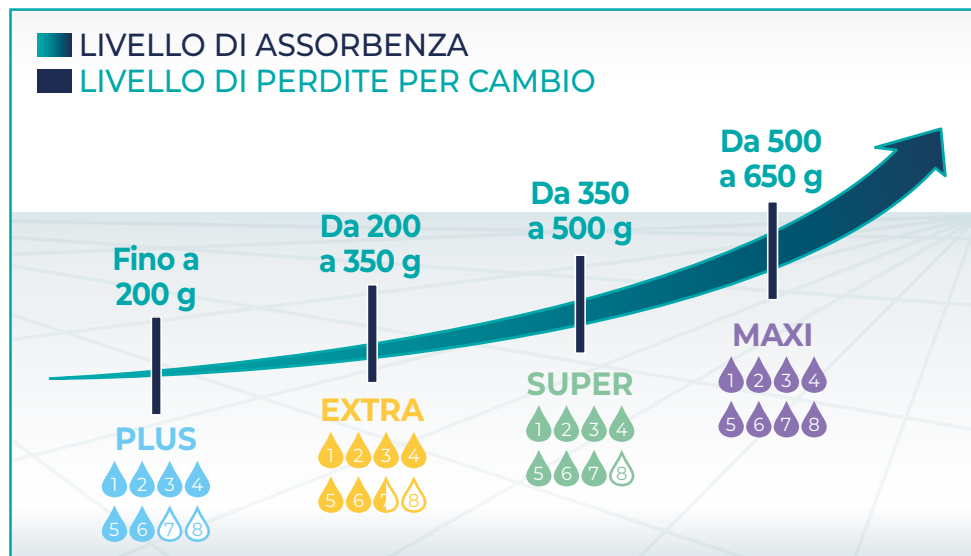

L'indicatore di umidità

Esistono indicatori di umidità a:

- **Viraggio**, dove il colore passa dal giallo al blu;
- **Scomparsa**, dove la scritta scomparirà completamente.

Se l'indicatore di umidità è completamente virato (blu) in tutta la sua lunghezza, il prodotto deve essere cambiato.

Se la scritta dell'indicatore a scomparsa non è più visibile, il prodotto deve essere cambiato.



Uso del doppio prodotto: un falso mito!

Inserire il rettangolare o un sagomato come inserto all'interno del pannolone, non aiuta realmente ad assorbire di più.

Il doppio prodotto, oltre a creare una maggiore occlusione della pelle, riduce drasticamente la traspirabilità, quindi, l'umidità rimane per più tempo a contatto con la cute.

L'utilizzo del doppio prodotto aumenterà il rischio di sviluppare arrossamenti, dermatiti e/o piaghe da decubito.

L'uso del pannolone, se ben indossato, è sufficiente a proteggere perché caratterizzato da una capacità assorbente idonea anche a carichi di urina importanti.



Attenzione alla taglia del pannolone a mutandina

Per evitare perdite d'urina è fondamentale indossare la giusta taglia di prodotto in base alla circonferenza vita e fianchi dell'assistito.

Di seguito una tabella che può orientarla sulla scelta della taglia giusta.

MISURA	TAGLIA	CIRC. VITA (cm)	CIRC. FIANCHI (cm)
S	38-40	50-80	60-85
M	42-44-46	70-110	85-100
L	48-50-52	OLTRE 110	100-130
XL	58	OLTRE 150	OLTRE 150



ATTENZIONE ALLA TAGLIA!


Al fine di dare la migliore protezione ed il miglior comfort possibili, il Pannolone a Mutandina deve essere della giusta taglia e deve essere indossato correttamente.

Innovazioni e tecnologie

È importante sottolineare che, grazie alla costante ricerca sulle innovazioni, molti prodotti LINES SPECIALIST sono dotati di **due tecnologie specifiche**:

LOZIONE ARRICCHITA CON OSSIDO DI ZINCO

Presente e visibile sul telino superiore (lato posteriore del prodotto), **la lozione**, grazie alla temperatura corporea, **si trasferisce sulla cute creando una barriera impermeabile**; la barriera contribuisce a tenere lontani umidità ed agenti irritanti.

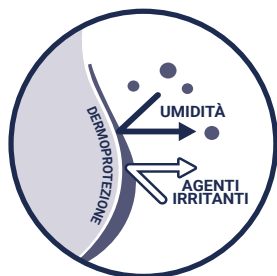

TECNOLOGIA ZERO ODORE

TECNOLOGIA PER IL CONTROLLO ODORE

In aggiunta al polimero super assorbente, **i pannoloni a mutandina e i pannoloni sagomati LINES Specialist sono dotati di una tecnologia specifica per la riduzione del malodore generato dall'urina.**

Scopri la gamma **fater**



MUTANDINE ASSORBENTI
(Tipo **Pants**)

▶ pag. **12**



PANNOLONI A MUTANDINA
(con etichette riposizionabili)

▶ pag. **14**



PANNOLONI SAGOMATI (Assorbenti senza sistema integrato di fissaggio)

▶ pag. **16**



PANNOLONE RETTANGOLARE

▶ pag. **18**



SAGOMATI ANATOMICI

▶ pag. **20**



ASSORBENTI MASCHILI

▶ pag. **22**




MUTANDE ELASTICHE

▶ pag. **24**



PANNOLONI A CINTURA

▶ pag. **26**

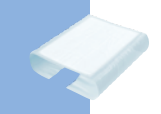

TRAVERSE

▶ pag. **28**



PANNOLINI A MUTANDINA
(per bambini)

▶ pag. **30**

LINES
SPECIALIST

Pants

GUARDA IL VIDEO
SUL CORRETTO
INDOSSAGGIO



UNISEX



DEAMBULANTE
PARZIALMENTE
DEAMBULANTE

I **Pants** sono ausili assorbenti monouso che si indossano come normali capi di biancheria intima e sono consigliati per chi soffre di **incontinenza da**

media a gravissima. Grazie alla fascia addominale elastica e al rivestimento esterno traspirante offrono comfort e discrezione e garantiscono praticità nel cambio.

ASSORBENZA	NUMERO DI GOCCE	LIVELLO DI INCONTINENZA	MISURA	CIRCONFERENZA VITA (cm)
PLUS	6	MEDIA/GRAVE	M	70-110
PLUS	6	MEDIA/GRAVE	L	100-140
PLUS	6	MEDIA/GRAVE	XL	OLTRE 140
SUPER	7	GRAVE/GRAVISSIMA	S	60-80
SUPER	7	GRAVE/GRAVISSIMA	M	70-110
SUPER	7	GRAVE/GRAVISSIMA	L	100-140
MAXI	8	GRAVISSIMA	S	60-80
MAXI	8	GRAVISSIMA	XL	OLTRE 140

Caratteristiche di prodotto



PROTEZIONE

Grazie al materassino assorbente a doppio strato realizzato con l'aggiunta di polimeri super assorbenti.



BARRIERE LATERALI

Aiutano a prevenire le fuoriuscite.



NUCLEO
CONTROLLA
ODORI

NUCLEO CONTROLLA ODORI

Speciale nucleo assorbente controlla odori.



FASCIA IN VITA

Facilita il posizionamento e l'adattabilità del prodotto alla conformazione corporea. Le saldature laterali possono essere facilmente aperte per un veloce cambio.



TAGLIA


INDICATORI DI TAGLIA

Identificazione della taglia del prodotto grazie alla scritta presente sul rivestimento esterno del prodotto.



INDICATORI DI CAMBIO

La scritta sul rivestimento esterno del prodotto, funge anche da indicatore di bagnato che si dissolve in corrispondenza della zona del prodotto bagnata, segnalando quando è il momento di effettuare il cambio.

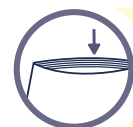


INDICATORE DI CORRETTO INDOSSAGGIO

Indossare il prodotto posizionando le strisce colorate sulla parte posteriore del corpo.

Pannoloni a Mutandina

GUARDA IL VIDEO
SUL CORRETTO
INDOSSAGGIO

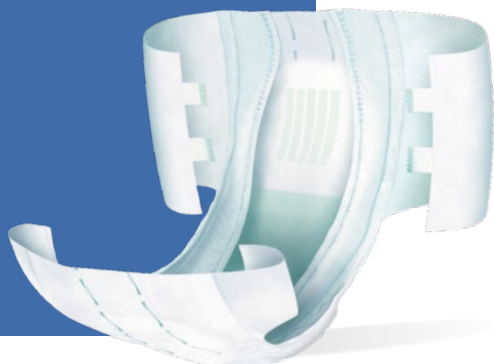

UNISEX



ALLETTATO



DEAMBULANTE
PARZIALMENTE
DEAMBULANTE

I **Pannoloni a Mutandina** sono ausili assorbenti indicati per persone parzialmente autonome o assistite/allettate che presentano un'**incontinenza grave o gravissima**.

I prodotti sono composti da un materassino di forma anatomica

e da un sistema di fissaggio ad etichette riposizionabili, per aprirli e richiuderli più volte. **Sono studiati per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche dell'utente** ed assomigliare a delle vere e proprie mutande con etichette adesive.

ASSORBENZA	NUMERO DI GOCCE	LIVELLO DI INCONTINENZA	MISURA	CIRC. VITA (cm)
SUPER	7	MEDIA/GRAVE	S	50-80
SUPER	7	MEDIA/GRAVE	M	70-110
SUPER	7	MEDIA/GRAVE	L	OLTRE 110
SUPER	7	MEDIA/GRAVE	XL	OLTRE 150
MAXI	8	GRAVE/GRAVISSIMA	S	50-80
MAXI	8	GRAVE/GRAVISSIMA	M	70-110
MAXI	8	GRAVE/GRAVISSIMA	L	OLTRE 110
MAXI	8	GRAVE/GRAVISSIMA	XL	OLTRE 150

Caratteristiche di prodotto



LOZIONE DERMOPROTETTIVA

Concentrata sulla parte posteriore del prodotto che, in uso, a contatto con la zona sacro-coccigea crea su di essa un leggero strato idrorepellente offrendo un'azione lenitiva e protettiva aiutando a prevenire e ridurre gli arrossamenti.



MORBIDEZZA E TRASPIRABILITÀ

Le fasce laterali traspiranti lasciano la pelle libera di respirare e, unite alla morbidezza del materassino assorbente, permettono all'ausilio di modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo.



TECNOLOGIA
ZERO
ODORE

TECNOLOGIA ZERO ODORE

Tecnologia specifica per la riduzione dell'odore.



ETICHETTE RIPOSIZIONABILI

Chiusura in vita mediante adesivi laterali riposizionabili per adattarsi alle diverse conformazioni corporee.



TAGLIA

INDICATORI DI TAGLIA

Identificazione della taglia del prodotto grazie alla scritta presente sul rivestimento esterno del prodotto.



INDICATORI LIVELLO DI ASSORBENZA

Identificati mediante la scritta colorata e numero di gocce (colore specifico per livello di assorbenza) stampata sul rivestimento esterno.



INDICATORI DI CAMBIO

Indicatori di umidità, che cambiano di colore (da giallo ad azzurro), segnalando quando è il momento di effettuare il cambio.

**LINES
SPECIALIST**

Pannoloni Sagomati

GUARDA IL VIDEO
SUL CORRETTO
INDOSSAGGIO



UNISEX



ALLETTATO



DEAMBULANTE
PARZIALMENTE
DEAMBULANTE



I **Pannoloni Sagomati** sono un ausilio assorbente indicato per persone autonome o assistite o allettate che presentano un'**incontinenza media, grave o gravissima**. Grazie alla **forma**

e **struttura**, possono essere indossati con la propria biancheria intima o con apposita mutanda elasticizzata rispondendo alle **esigenze di comfort e protezione**.

ASSORBENZA	NUMERO DI GOCCE	LIVELLO DI INCONTINENZA	MISURA
PLUS	6	LEGGERA	UNICA
EXTRA	6,5	MEDIA	UNICA
SUPER	7	GRAVE	UNICA
MAXI	8	GRAVISSIMA	UNICA

Caratteristiche di prodotto



LOZIONE DERMOPROTETTIVA

Concentrata sulla parte posteriore del prodotto che, in uso, a contatto con la zona sacro-coccigea crea su di essa un leggero strato idrorepellente offrendo un'azione lenitiva e protettiva aiutando a prevenire e ridurre gli arrossamenti.



MORBIDE BARRIERE LATERALI

Aiutano a prevenire le fuoriuscite.



TECNOLOGIA ZERO ODORE

Tecnologia specifica per la riduzione dell'odore.



INDICATORI DI POSIZIONAMENTO

Aiutano a riconoscere la parte anteriore del prodotto, grazie alle freccette rivolte verso l'alto, impresse sul rivestimento esterno.




INDICATORI LIVELLO DI ASSORBENZA

Identificati mediante la scritta colorata e numero di gocce (colore specifico per livello di assorbenza) stampata sul rivestimento esterno.



INDICATORI DI CAMBIO

Indicatori di umidità, che cambiano di colore (da giallo ad azzurro), segnalando quando è il momento di effettuare il cambio.

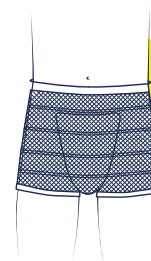

LO SAPEVI CHE?

Puoi utilizzare il Sagomato sia con la tua biancheria che con la mutanda a rete, l'importante è che il prodotto sia ben aderente al corpo. La mutanda a rete è studiata appositamente per mantenere il prodotto ben fermo.

Pannoloni Rettangolari



SI RACCOMANDA DI:
POSIZIONARE IL PRODOTTO
ALLINEANDO IL DAVANTI E
IL DIETRO DELLO STESSO.



UNISEX



ALLETTATO



DEAMBULANTE
PARZIALMENTE
DEAMBULANTE

I **Pannoloni Rettangolari** sono ausili assorbenti adatti per persone attive, parzialmente autonome o assistite, con un'incontinenza da leggera a media. Si indossano con la propria biancheria intima o con le apposite mutande elastiche.

ASSORBENZA	NUMERO DI GOCCE	LIVELLO DI INCONTINENZA	MISURA	TIPOLOGIA
PLUS	6	LEGGERA	UNICA	CON BARRIERA

Caratteristiche di prodotto



PROTEZIONE

Materassino di polpa di cellulosa e polimeri super-assorbenti, assorbe rapidamente i fluidi biologici, mantenendo la pelle asciutta.



RIVESTIMENTO ESTERNO

Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene.



NUCLEO
CONTROLLA
ODORI

NUCLEO CONTROLLA ODORI

Speciale nucleo assorbente controlla odori.



INDICATORI DI CAMBIO

Indicatori di umidità, che cambiano di colore (da giallo ad azzurro), segnalando quando è il momento di effettuare il cambio.



PROTEZIONE DELLA PELLE

Telino superiore a contatto con la pelle ipoallergenico e dermatologicamente testato.



VESTIBILITÀ E COMFORT

I bordi del prodotto sono rifiniti con cura e garantiscono comfort e morbidezza.

Assorbenti femminili e Sagomati anatomici



Gli **Assorbenti femminili** e i **Sagomati anatomici** sono ausili assorbenti adatti per **perdite da leggere a medie** ed assicurano massima discrezione e comfort grazie ai profili arrotondati che

permettono ai prodotti di modellarsi in maniera anatomica al corpo e agli adesivi che ne consentono un corretto fissaggio alla biancheria intima, riducendo il rischio che si muovano durante l'uso.

	ASSORBENZA	NUMERO DI GOCCE	LIVELLO DI INCONTINENZA	MISURA
ASSORBENTI FEMMINILI	MINI PLUS	2	LEGGERA	UNICA
	NORMAL	3	LEGGERA	UNICA
	EXTRA	4	LEGGERA	UNICA
SAGOMATI ANATOMICI	SUPER	5	MEDIA	UNICA
	SUPER PLUS	6	MEDIA	UNICA

Caratteristiche di prodotto



SPECIALE SISTEMA ASSORBENTE

Materassino di polpa di cellulosa e polimeri super-assorbenti, assorbe rapidamente i fluidi biologici, mantenendo la pelle asciutta.



NUCLEO CONTROLLA ODORI

Speciale nucleo assorbente controlla odori.



STRISCIA ADESIVA

Posizionata lungo tutto il rivestimento esterno del prodotto per fissare il prodotto alla biancheria intima.



PROTEZIONE DELLA PELLE

Telino superiore a contatto con la pelle ipoallergenico e dermatologicamente testato.



VESTIBILITÀ E COMFORT

I bordi del prodotto sono rifiniti con cura e garantiscono comfort e morbidezza.

Assorbenti maschili

RICORDA DI:
STACCARE L'ETICHETTA ADESIVA,
INSERIRE L'ASSORBENTE NELLA
MUTANDA FACENDOLO ADERIRE.



Gli **Assorbenti maschili** per incontinenza sono ausili per **perdite di urina leggere**, studiati per adattarsi alle diverse anatomie maschili e garantire un'elevata protezione.

ASSORBENZA	LIVELLO DI INCONTINENZA	MISURA
LIVELLO 0	LEGGERA	UNICA
LIVELLO 1 - LIGHT	LEGGERA	UNICA
LIVELLO 2 - MEDIUM	MEDIA	UNICA

Caratteristiche di prodotto



PROTEZIONE

Materassino di polpa di cellulosa e polimeri super-assorbenti, assorbe rapidamente i fluidi biologici, mantenendo la pelle asciutta.



NUCLEO CONTROLLA ODORI

Speciale nucleo assorbente controlla odori.



RIVESTIMENTO ESTERNO IMPERMEABILE

Rivestimento esterno di un materiale "tipo cotone" impermeabile.



BARRIERE LATERALI INTERNE

Contribuiscono a prevenire il rischio di fuoriuscite.



STRISCIA ADESIVA

Posizionata lungo tutto il rivestimento esterno per fissare il prodotto alla biancheria intima.



PROTEZIONE DELLA PELLE

Telino superiore a contatto con la pelle ipoallergenico e dermatologicamente testato.



VESTIBILITÀ E COMFORT

I bordi del prodotto sono rifiniti con cura e garantiscono comfort e morbidezza.

LINES
SPECIALIST

Mutande a Rete

LO SAPEVI CHE?
LE TAGLIE SONO IDENTIFICABILI
GRAZIE AL COLORE
DELL'ELASTICO IN VITA



UNISEX



ALLETTATO




DEAMBULANTE
PARZIALMENTE
DEAMBULANTE

Le **Mutande a Rete elasticizzate**, sono un accessorio che permettono di posizionare in modo sicuro i **Pannoloni**

Sagomati e Rettangolari con barriera. Sono prive di cuciture, proteggendo così la pelle da arrossamenti.



Caratteristiche di prodotto

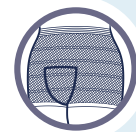


MORBIDO TESSUTO A RETE

La morbidezza del "tessuto a rete" ed il particolare design della cintura e del cavallo della mutanda, contribuiscono a garantire comfort e vestibilità. Tessuto con elevata poliestensibilità.



COMPATIBILITÀ CUTANEA

Il tessuto elastico della mutanda a rete favorisce la naturale traspirabilità della pelle e non crea irritazioni dovute a frizioni meccaniche né a compressioni eccessive della fibra elastica sulla cute.

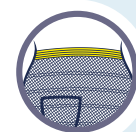

PRATICITÀ

La mutanda elastica è lavabile a 60° e riutilizzabile più volte. È disponibile in 4 taglie, facilmente identificabili grazie al colore diverso dell'elastico in vita (giallo, blue, marrone e verde).



COMPOSIZIONE:

85% Poliestere | 15% Elastan


Una mutanda così composta riesce a trattenere, senza comprimere, anche prodotti di grandi dimensioni.



Utilizza questo prodotto con:
PANNOLONI SAGOMATI o
RETTANGOLARI CON BARRIERA



Pannoloni a Mutandina con cintura

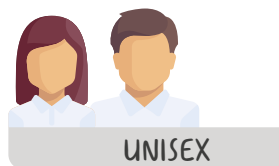

I **Pannoloni a Mutandina con Cintura** sono ausili assorbenti indicati per persone parzialmente autonome o assistite/allettate che

presentano un'**incontinenza da grave a gravissima**, dotati di una cintura di fissaggio addominale.

ASSORBENZA	NUMERO DI GOCCE	LIVELLO DI INCONTINENZA	MISURA	CIRC. VITA (cm)
/	6	GRAVE	S	50-85
SUPER	7	GRAVE	M	70-110
SUPER	7	GRAVE	L	OLTRE 110
/	7	GRAVE	XL	110-160

Caratteristiche di prodotto



SPECIALE SISTEMA ASSORBENTE

Materassino di polpa di cellulosa e polimeri super-assorbenti, assorbe rapidamente i fluidi biologici, mantenendo la pelle asciutta.



RIVESTIMENTO ESTERNO

Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene.



NUCLEO CONTROLLA ODORI

NUCLEO CONTROLLA ODORI


Speciale nucleo assorbente controlla odori.



FASCE LATERALI TRASPIRANTI

Lasciano la pelle più libera di respirare riducendo il rischio di arrossamenti e irritazioni.

Traverse

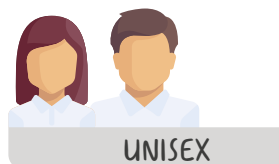

LO SAPEVI CHE?
NON DEVE ESSERE UTILIZZATA
CON MATERASSINO
ANTIDECUBITO.



80 x 180 cm
RIMBOCCABILE

60 x 90 cm
MULTIUSO

Le **Traverse** sono un accessorio di protezione secondaria, utilizzate **per proteggere letti, sedute, materassi, sedie, divani**

e superfici in generale da eventuali fuoriuscite di urina o durante le procedure di igiene del paziente.

Caratteristiche di prodotto



SICURA E CONFORTEVOLE

La traversa è studiata specificatamente per rendere confortevole il contatto con il corpo grazie alla presenza di un filtrante che fa passare i liquidi, alla struttura interna in cellulosa che li assorbe e alla barriera impermeabile che non li fa fuoriuscire.



PROTEZIONE DELLA PELLE

Telino superiore a contatto con la pelle ipoallergenico e dermatologicamente testato.



MULTIUSO



Grazie alla sua versatilità d'uso, offre una protezione delle superfici per chi soffre di incontinenza, dal letto alle poltrone reclinabili e sedie a rotelle.



TIPOLOGIA	LIVELLO DI PROTEZIONE	MISURA (cm)
/	MEDIA	60x90
RIMBOCCABILE	MEDIA	80x180



Pannolini a Mutandina per bambini

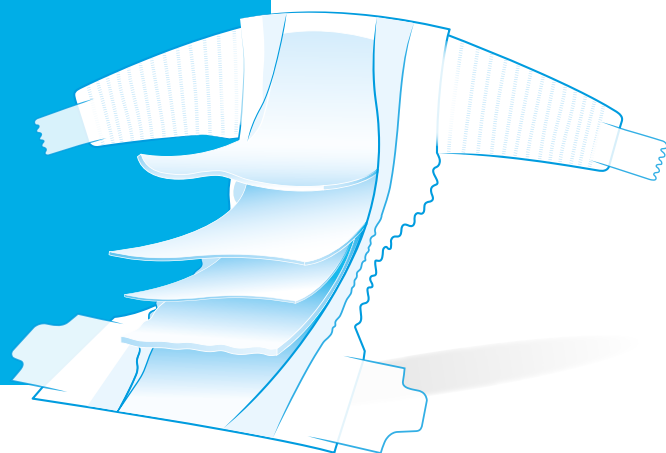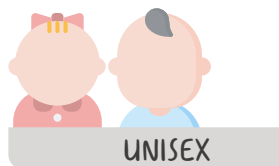

I **Pannolini a Mutandina per bambini** sono ausili assorbenti indicati per bambini **di età maggiore di due anni** affetti da gravi **malformazioni** uro-anorettali **o** affetti da **patologie gravi** che comportano l'assenza del controllo sfinterico.

I prodotti sono specificatamente studiati per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche del bambino ed assomigliare ad una "mutanda" vera e propria. Sono composti da un materassino di forma anatomica e sottile per dare più comfort.

TAGLIA	TAGLIA	PESO CORPOREO UTILIZZATORI (KG)
PANNOLINO A MUTANDINA	MAXI	da 7 a 18
PANNOLINO A MUTANDINA	JUNIOR	da 11 a 25
PANNOLINO A MUTANDINA	EXTRA LARGE	da 15 a 30
PANTS	S/M	da 17 a 30
PANTS	L/XL	da 27 a 43

Caratteristiche di prodotto



STRUTTURA ASSORBENTE A 3 STRATI

L'esclusiva struttura assorbente a 3 strati consente di assorbire velocemente l'urina, tenendola lontano dalla pelle.



RIVESTIMENTO ESTERNO TRASPIRANTE

Lo speciale rivestimento esterno, morbido e traspirante, aiuta a tenere l'umidità lontano dalla pelle.



MORBIDE BARRIERE LATERALI

Aiutano a prevenire le fuoriuscite.



NUCLEO CONTROLLA ODORI

Speciale nucleo assorbente controlla odori.



ETICHETTE RIPOSIZIONABILI

Chiusura in vita mediante adesivi laterali riposizionabili più e più volte per adattarsi alle diverse conformazioni corporee.



FASCE LATERALI ELASTICIZZATE

Consentono un'agevole chiusura del prodotto, estendendosi fino a 10 cm.

Riepilogo della gamma prodotti



MUTANDINE ASSORBENTI (Tipo Pants)

PRODOTTO	MISURA	LIVELLO DI INCONTINENZA
LINES SPECIALIST CLASSIC PANTS PLUS	M	MEDIA/GRAVE
LINES SPECIALIST CLASSIC PANTS PLUS	L	MEDIA/GRAVE
LINES SPECIALIST DERMA PROTECTION PANTS PLUS	XL	MEDIA/GRAVE
LINES SPECIALIST CLASSIC PANTS SUPER	S	GRAVE/GRAVISSIMA
LINES SPECIALIST CLASSIC PANTS SUPER	M	GRAVE/GRAVISSIMA
LINES SPECIALIST CLASSIC PANTS SUPER	L	GRAVE/GRAVISSIMA
LINES SPECIALIST CLASSIC PANTS MAXI	S	GRAVE/GRAVISSIMA
LINES SPECIALIST UNISEX PANTS MAXI	XL	GRAVE/GRAVISSIMA



PANNOLONI A MUTANDINA (con etichette riposizionabili)

PRODOTTO	MISURA	LIVELLO DI INCONTINENZA
LINES SPECIALIST DERMA PROTECTION SUPER	S	MEDIA/GRAVE
LINES SPECIALIST CLASSIC SUPER	M	MEDIA/GRAVE
LINES SPECIALIST CLASSIC SUPER	L	MEDIA/GRAVE
LINES SPECIALIST DERMA PROTECTION SUPER	XL	MEDIA/GRAVE
LINES SPECIALIST DERMA PROTECTION MAXI	S	GRAVE/GRAVISSIMA
LINES SPECIALIST DERMA PROTECTION MAXI	M	GRAVE/GRAVISSIMA
LINES SPECIALIST DERMA PROTECTION MAXI	L	GRAVE/GRAVISSIMA
LINES SPECIALIST DERMA PROTECTION ALTA PROTEZIONE LIVELLO 10	XL	GRAVE/GRAVISSIMA



SAGOMATI (Assorbenti senza sistema integrato di fissaggio)

PRODOTTO	MISURA	LIVELLO DI INCONTINENZA
LINES SPECIALIST DERMA PROTECTION PLUS	PICCOLO	LEGGERA
LINES SPECIALIST DERMA PROTECTION EXTRA	MEDIO	MEDIA
LINES SPECIALIST DERMA PROTECTION SUPER	GRANDE	GRAVE
LINES SPECIALIST DERMA PROTECTION MAXI	GRANDISSIMO	GRAVISSIMA



PANNOLONE RETTANGOLARE

PRODOTTO	MISURA	LIVELLO DI INCONTINENZA
LINES SPECIALIST CLASSIC RETTANGOLARE C/B	UNICA	LEGGERA



ASSORBENTI PER INCONTINENZA

PRODOTTO	MISURA	LIVELLO DI INCONTINENZA
LINES SPECIALIST MINI PLUS	/	LEGGERA
LINES SPECIALIST PROTECTION NORMAL	/	LEGGERA
LINES SPECIALISTE DERMA PROTECTION SAGOMATO ANATOMICO EXTRA	/	LEGGERA
LINES SPECIALIST DERMA PROTECTION SAGOMATO ANATOMICO SUPER	/	MEDIA
LINES SPECIALIST DERMA PROTECTION AGOMATO ANATOMICO SUPER PLUS	/	MEDIA
ASSORBENTE MASCHILE LIVELLO 0	/	LEGGERA
LINES SPECIALIST MEN LIVELLO 1 - LIGHT	/	LEGGERA
LINES SPECIALIST MEN LIVELLO 2 - MEDIUM	/	MEDIA



ACCESSORI

PRODOTTO	MISURA	LIVELLO DI PROTEZIONE
LINES SPECIALIST MUTANDE ELASTICHE	S	/
LINES SPECIALIST MUTANDE ELASTICHE	M	/
LINES SPECIALIST MUTANDE ELASTICHE	L	/
LINES SPECIALIST MUTANDE ELASTICHE	XL	/
LINIDOR TRAVERSA	60x90 cm	MEDIA
LINIDOR TRAVERSA	80x180 cm	MEDIA



PANNOLONI A CINTURA

PRODOTTO	MISURA	LIVELLO DI INCONTINENZA
PANNOLONE A CINTURA	S	GRAVE
LINES SPECIALIST PANNOLONE A CINTURA SUPER	M	GRAVE
LINES SPECIALIST PANNOLONE A CINTURA SUPER	L	GRAVE
PANNOLONE A CINTURA	XL	GRAVE



PANNOLINI A MUTANDINA (per bambini)

PRODOTTO	MISURA	LIVELLO DI INCONTINENZA
PAMPERS BABY CARE MAXI	da 7 a 18	/
PAMPERS BABY CARE JUNIOR	da 11 a 25	/
PAMPERS BABY CARE EXTRA LARGE	da 15 a 30	/
PAMPERS SALVAPIGIAMINO S/M	da 17 a 30	/
PAMPERS SALVAPIGIAMINO L/XL	da 27 a 43	/

SI RICORDA AI GENTILI ASSISTITI E LORO CAREGIVER:

Ogni prodotto fornito rimane di esclusiva proprietà della singola Azienda UsI interessata, su tale fornitura sussiste l'obbligo di restituzione di ogni ausilio consegnato e non utilizzato per causa sopravvenute (ad esempio: trasferimento, decesso, ricovero dell'assistito), fatta salva la richiesta di minor numero di ausili nelle successive consegne, al fine di evitarne il relativo acquisto.

Le consegne sono gratuite, nessuna somma di denaro sarà dovuta al corriere che consegnerà la fornitura.

PRENDI QUI I TUOI APPUNTI

LINES SPECIALIST

www.lines-specialist.it

A close-up photograph of two hands being held together. The hands are light-skinned and appear to be of an older person, with visible wrinkles and veins. The hands are resting on a white fabric surface. The background is a soft, out-of-focus green color.

fater

FATER S.p.A.

Via Mare Adriatico, 122
65010 Spoltore (Pescara)
ITALIA

www.fatergroup.com